

MAJOR PL Sp. z o.o.

Ul. 11-go Listopada 10
26-700 Zwolen

tel. +48 48 676 22 26 fax. +48 48 676 33 47

www.majorpl.pl biuro@majorpl.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000189877, Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN (wpłacony w całości)



MAJOR.TRAY

Zastosowanie

Masa akrylowa na bazie polimetakrylanu metylu do wycisków na łyżki indywidualne. Samopolimeryzująca. Proszek i płyn.

Dane techniczne proszku

Dostępne kolory: żółty, zielony, niebieski

Postać: Perełkowy proszek

Skład: Polimetakrylan metylu

Barwniki: Zatwierdzony do zastosowań zewnątrzustnych. Pigmenty nie zawierają ołowiu.

Dane techniczne płynu

Postać: Bezbarwny płyn

Skład: Metakrylan metylu oraz roztwór innych składników

Sposób użycia

Przygotowanie i proporcje składników

Przygotowanie: mieszać 15g proszku z 5ml (4,5g) płynu; empirycznie: 4 miarki proszku do 1 miarki płynu

Mieszanie: Wlać płyn do szklanej miseczki lub moździerza następnie dodać proszek. Dokładnie mieszać przez 30 sek. metalową (lub szklaną) szpatułką.

Nakładanie: Użyć standardowego instrumentu (szklany lub metalowy) odpowiedniego do pracy z akrylem. Zaleca się zwilżenie narzędzia monomerem, aby ułatwić pracę z masą.

Czas pracy: 5 min.

Procedura polimeryzacji

Polimeryzacja na powietrzu przez 9 min.

Wykańczanie

Wykańczać i polerować przy użyciu frezów, separatorów, krążków oraz past polerskich przeznaczonych do materiałów akrylowych. Unikać podwyższonej temperatury, która może zniszczyć materiał.

Uwaga!

Nie mieszać proszków w różnych kolorach. Pracować w czystych warunkach. Wymieszany materiał może nie uzyskać pożądanego koloru. Podane czasy obowiązują w temperaturze pokojowej i temperaturze materiałów od +23°C do -1°C; inne temperatury mogą wydłużyć lub skrócić czasy pracy.

Przechowywanie materiału

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródła światła. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Nie wystawiać płynów na działanie światła i ciepła: może to doprowadzić do częściowej polimeryzacji płynu. Utylizować zużyte opakowania po płynach i proszkach.

Informacje o bezpieczeństwie i zdrowiu

Płyny zawierają pewne niebezpieczne substancje i składniki według Dyrektywy 67/548/EEC. Oddzielnie dostępne są dane dotyczące bezpieczeństwa towaru.

Proszki nie zawierają niebezpiecznych substancji i składników według Dyrektywy 67/548/EEC. Dane dotyczące bezpieczeństwa towaru nie są dostępne.

Generalne zasady bezpieczeństwa

Płyn jest łatwopalny. Trzymać z dala od ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić w pobliżu materiału.

Proszki są sklasyfikowane jako „proszki nigdzie indziej niesklasyfikowane”. Pyły powstające podczas obróbki zostały sklasyfikowane jako „pyły nigdzie indziej niesklasyfikowane”. Nie wdychać pyłów; używać wyciągów i/lub maseczek ochronnych. TLV i TWA stosowane.

Zasady bezpieczeństwa przy pracy

Płyn może uczulać skórę i podrażniać oczy. Unikać długotrwałego kontaktu skóry z płynem lub niespolimeryzowanym żelem. Opary mogą podrażniać układ oddechowy. Nie wdychać; pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Używać wyciągów i/lub maseczek ochronnych. TLV i TWA stosowane.

Przypadkowe rozsianie/rozlanie materiału: Podnieść i wyrzucić. Nie używać ponownie.

MAJOR PL Sp. z o.o.

Ul. 11-go Listopada 10

26-700 Zwolen

tel. +48 48 676 22 26 fax. +48 48 676 33 47

www.majorpl.pl biuro@majorpl.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000189877, Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN (wpłacony w całości)



Informacje o bezpieczeństwie pacjenta

Niepożądane efekty: **Niespolimeryzowany materiał:** unikać kontaktu niespolimeryzowanego żelu ze śluzówką jamy ustnej. **Spolimeryzowany materiał:** niektóre reakcje, na przykład metakrylu metylu, mogą być podrażniające lub uczulające dla pacjenta. Wiedza o alergiach pacjenta jest pożądana; monitorować reakcje pacjenta podczas pierwszego badania.

Informacje dotyczące warunków higienicznych: Poinformować pacjenta na temat dziennej pielęgnacji protezy. Poinformować pacjenta, aby unikać kontaktu protezy z kwasami, zasadami oraz innymi substancjami, mogącymi zniszczyć materiał akrylowy.

Informacje o utylizacji

Uwaga: Płyn jest niebezpieczny dla wody – nie wylewać do ścieków. Po opróżnieniu: butelkę umyć i suszyć przez parę dni dnem do góry. Opakowania utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Spełnia wymogi Aneksu I Dyrektywy 93/42/EEC. Może być wykorzystany do wykonywania innych prac protetycznych, pod warunkiem, że użytkownik zweryfikuje czy produkt technicznie odpowiada pożądanemu zastosowaniu (kolor, elastyczność, twardość, itp.).